

- Iniciar um Novo Teste
- Preencher os dados do paciente

1



Nome: Paciente de Demonstração ID: 543JKL


Masculino Feminino Data de Nascimento: 01-01-1980

Notas:

O paciente cumpre os [requisitos para realização do exame](#)

- **Preparar o material** para a realização do teste (tubo indicador, tubo de silicone, aplicador bucal)
- **Preparar a carga:** diluir a unidose de Ureia e D-Manitol em 50 – 100 mL de água

2

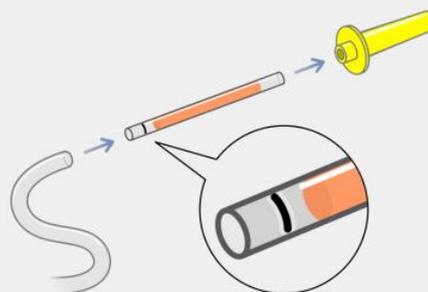

- O paciente deve:
 1. Lavar a boca com a água.
 2. **Ingerir a carga.**
 3. Lavar novamente a boca.
- Clicar em “SEGUINTE”.

3


Enxague a boca com água → Tome a carga → Enxague a boca com água



- Após ingestão da carga é necessário aguardar 1 minuto.
- O tempo é controlado automaticamente pelo software.

4

Por Favor Aguarde...

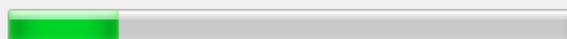

- Após o contador de 1 minuto terminar:
 1. O paciente **coloca o aplicador bucal na boca.**
- Ao clicar em “SEGUINTE” a aspiração basal irá iniciar.
- **Não deve esperar que o contador exibido abaixo termine,** deve clicar em “SEGUINTE” antes de o tempo terminar.

5



Por favor, prossiga para o passo 2 antes que a contagem termine. De outra forma o teste será inválido.


00:47

SEGUINTE

- A aspiração basal tem a duração de 3 minutos.
- O tempo é controlado automaticamente pelo software.

6


Por Favor Aguarde...

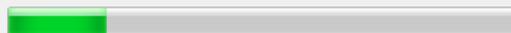

O paciente deve permanecer imóvel e respirar normalmente.
O paciente não deve soprar para o tubo.
O tubo não pode ser contaminado com saliva.
No caso de acumulação de saliva na cavidade bucal do paciente, este pode retirar o tubo indicador, engolir e repor o tubo.


7

- Tempo máximo de **1 minuto e 30 segundos** para completar as ações 7 a 9.
- Após a aspiração basal terminar:
 1. **Colocar o tubo indicador na casete de leitura.**
 2. Posicionar o tubo de acordo com a indicação.
- Clicar em “SEGUINTE” para adquirir a imagem.

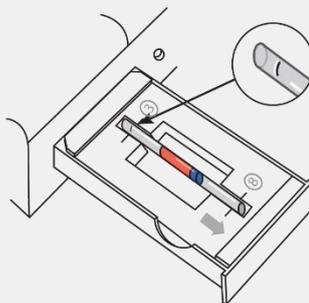


8

- O software analisa automaticamente o tubo indicador e regista a leitura basal.
- Clicar em “SEGUINTE”

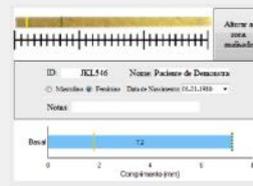


9

- Após a leitura basal:
 1. **Colocar o tubo indicador novamente no bucal**, com o marcador na posição indicada na figura.
- Clicar em “SEGUINTE”.
- **O paciente colocar o bucal na boca.**
- Clicar em “SEGUINTE”.
- Irá iniciar-se a aspiração de carga.
- **Não é necessário esperar que este contador termine**, deve avançar para a aspiração dentro desta janela temporal

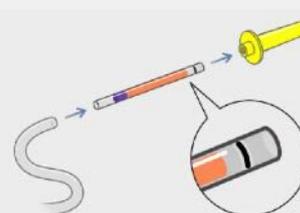

Por favor, complete os passos 3-6 antes que a contagem termine. De outra forma o teste será inválido.

00:24

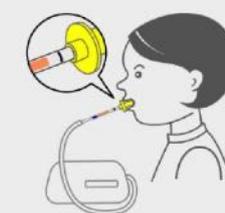

Por favor, complete os passos 3-6 antes que a contagem termine. De outra forma o teste será inválido.

00:16

10

- A aspiração carga tem a duração de 6 minutos.
- O tempo é controlado pelo software.

Por Favor Aguarde...



O paciente deve permanecer imóvel e respirar normalmente.
O paciente não deve soprar para o tubo.
O tubo não pode ser contaminado com saliva.
No caso de acumulação de saliva na cavidade bucal do paciente, este pode retirar o tubo indicador, engolir e repor o tubo.


11

- Quando a aspiração terminar surge um aviso automático



12

- Após a aspiração de carga terminar:
 1. **Colocar o tubo indicador na casete de leitura.**
 2. Posicionar o tubo de acordo com a indicação.
- Clicar em “SEGUINTE” para adquirir a imagem.

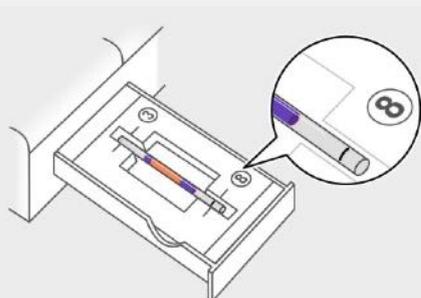

13

- Terminou o teste, o resultado pode ser impresso ou exportado

